

# WELLSAMED HELIX TEST SYSTEM

## BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Prüfen Sie ob die Helix trocken ist und keine sichtbaren Beschädigungen hat.
2. Öffnen Sie das Röhrchen indem Sie die Kapsel abschrauben.
3. Reißen Sie einen Indikatorstreifen vom Blatt ab. Falten Sie diesen in der Mitte mit dem Indikator nach innen.
4. Stecken Sie den Streifen mit der gefalteten Seite zuerst in die Kapsel.
5. Stellen Sie sicher, dass der Indikator nicht aus der Kapsel rutscht.
6. Schrauben Sie die Kapsel wieder auf und legen Sie die Helix in den Sterilisator.
7. Machen Sie einen Sterilisationszyklus wie auf dem Indikator beschrieben.
8. Nach der Sterilisation entnehmen Sie die Helix aus dem Sterilisator.
9. Öffnen Sie die Kapsel und entnehmen Sie den Indikator. Die Charge war erfolgreich, wenn der Indikator entsprechend der Referenz umgeschlagen ist.
10. Der Indikatorstreifen hat eine selbstklebende Rückseite und kann in ein Chargenprotokoll eingeklebt werden. Diese Vorgehensweise vermeidet menschliche Fehler und ermöglicht eine bessere Rückverfolgung. Die Indikatoren müssen vor und nach der Benutzung kühl und trocken gelagert werden!

## REFERENZ:

