

Reinigung & Desinfektion von zahnärztlichen und medizinischen Absauganlagen

Stand: 06.11.2012



AlproJet-D

Anwendungsgebiet:

AlproJet-D (D = daily) wird **5%ig** angewendet und ist für das Reinigen/ Neutralisieren (u. a. Speichel, Säuren) ausgelegt. AlproJet-D sollte **2 x täglich** eingesetzt werden.

Anwendungsbeschreibung:

Benötigt werden **2 Liter** Gebrauchslösung.



Dosierkammerverschluss öffnen, die Dosierflasche drücken, bis die Dosierkammer zur „50 ml“-Marke gefüllt ist. **2 Dosierungen (100 ml) mit 40-50 °C warmem Wasser** im AlproJet MixCup **zu 2 Litern** Gebrauchslösung **auffüllen**.

Saugschläuche aufstecken, **Spraynebelsauger auf den Ansatz** mit der **großen Öffnung** und den **Speichelsauger auf den Ansatz** mit der **kleinen Öffnung** des AlproJet MixCups stecken. Durch die unterschiedlichen Schlauchlängen im AlproJet MixCup erhält der Speichelsauger 200 ml zusätzlich, dies verbessert das Reinigungsergebnis.

Danach **bleibt 1 Liter** Gebrauchslösung **im AlproJet MixCup**. Die **restliche** Lösung schluckweise **in die Speischale geben** und einwirken lassen. Erst **vor Arbeitsbeginn gut mit Wasser nachspülen** (sowohl Speischale als auch die Saugschläuche), um noch nachträglich gelöste Rückstände herauszuspülen.

AlproJet-DD

Anwendungsgebiet:

AlproJet-DD 2%-ig hat die gleichen Eigenschaften wie AlproJet-D, ist aber höher konzentriert und hat **zusätzliche Desinfektionswirkstoffe**.

AlproJet-DD sollte **2 x täglich (mittags + abends)** eingesetzt werden.

Anwendungsbeschreibung:

Es werden 20 ml pro 1 Liter Gebrauchslösung benötigt. Auch hier über die Dosierkammer **2 x 20 ml dosieren** und im AlproJet MixCup **mit 40-50 °C warmem Wasser zu 2 Liter** Gebrauchslösung **auffüllen**.

Handhabung siehe AlproJet-D.



AlproJet-W

Anwendungsgebiet:

AlproJet-W (W = weekly) **ist ein Spezialpräparat** und wird als **5-10%ige** Gebrauchslösung **eingesetzt**. AlproJet-W wird **an 2 Tagen in der Woche anstelle** von **AlproJet-D** oder **AlproJet-DD** angewandt wobei die Anwendung auch hier **2 x täglich** erfolgen sollte.

AlproJet-W ist vorwiegend **zum Lösen** von **Protein** konzipiert. Das bei chirurgischen Arbeiten anfallende Blut kann somit leichter aus Abscheide- und Zentrifugensystemen in den Abfluss geleitet werden.

Anwendungsbeschreibung:

Vor einer **chirurgischen Arbeit** (wegen möglicher Schaumbildung durch Blut und Wasserstoffperoxid) 1000 ml **kalte 5%ige AlproJet-W-Lösung über die Schläuche in das System saugen**.


Ablagerungen werden verhindert, Wasserstoffperoxid im Auffangbehälter neutralisiert und die Schaumentwicklung reduziert. **In diesem Fall sollte AlproJet-W mit kaltem Wasser angemischt werden.**

Starke Verschmutzungen bzw. bereits koaguliertes Blut

50 – 60 °C warme AlproJet-W-Lösung 10 %ig anwenden.

Resultat:

Der **Lösungsvorgang** wird **beschleunigt**, **Rückstände** werden **pumpengängig** und somit **leichter abtransportiert**.

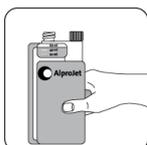

Reinigung & Desinfektion von zahnärztlichen und medizinischen Absauganlagen

Stand: 06.11.2012

**Prophylaxe:**

Das Arbeiten mit **Pulverstrahl-Geräten** (z. B. Airflow, Natriumbicarbonat) und Polierpasten verstärkt die Schaumbildung (Tenside/Emulgatoren) und führt zu Saugaussetzern.

Lösung:

Vor der Behandlung eine **5- 10%ige kalte AlproJet-W-Lösung** (1 - 2 Liter) in das Absaugsystem **einsaugen**.

Resultat:

Die schäumenden **Rückstände werden neutralisiert** und **Saugaussetzer verhindert**.

Grundreinigung: Konzentration + Temp. siehe („starke Verschmutzung“)
3 – 5 Ltr. AlproJet-W 10%ige Anwenderkonzentration. Lösung absaugen,
1 – 2 Std. einwirken lassen und mit 50°C heißem Wasser nachspülen.

Resultat:

Der **Lösungsvorgang** wird **beschleunigt**, **Rückstände** werden **pumpengängig** und somit **leichter abtransportiert**.

**Grundsätzliche Anwendungsempfehlungen:****Nach jeder Behandlung am Patienten:**

1 – 2 Becher kaltes Wasser absaugen, Speischalenspülung 30 sec. betätigen (ca. 0,5 – 1 Ltr.)!

Weitere Anwendungsempfehlungen:**Für Einzelplatzamalgamabscheider:**

Je nach Arbeitsweise **3 x** wöchentlich **AlproJet-D/AlproJet-DD** (z. B. **Mittwoch bis Freitag**) und **2 x** wöchentlich **AlproJet-W** (**Montag und Dienstag**) verwenden. Bei **hohem Proteineintrag** kann auch **3 x** wöchentlich mit **AlproJet-W** gearbeitet werden und **2 x** wöchentlich mit **AlproJet-D/AlproJet-DD**.

Für zentrale Abscheide- und Separationssysteme:

Bei zentralen Nassabsaugsystemen (lange Abflusswege) AlproJetD / DD + AlproJet-W im **wöchentlichen Wechsel** 2 x tägl. anwenden.

Einwirkzeit: mindestens 30 Minuten!

Erst **vor Arbeitsbeginn (morgens oder nach der Mittagspause)** Saugschläuche und Speischale **gut mit Wasser nachspülen** (z.B. mehrmaliges Betätigen der Speischalenspülung).

Durch die ausgezeichnete Materialverträglichkeit wird das komplette System auch bei langen Einwirkzeiten nicht geschädigt! Dies wird durch regelmäßige neutrale Untersuchungen immer wieder bestätigt (Freigabe von Sirona Dental, Bensheim).

Diverse Gutachten stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung!