

Produktdatenblatt ProfiGuard Prophylaxepaste

Anwendungsbereich

Prophylaxepaste für den einfachen, schnellen und zuverlässigen Gebrauch.

Anwendung

Nach der Zahnsteinentfernung ProfiGuard in ein Dappenglas oder ein vergleichbar geeignetes Behältnis geben. Eine kleine Menge Paste dann mit dem Gummikelch oder der Polierbürste aufnehmen und in das Arbeitsgebiet einbringen. Darauf achten, dass das Winkelstück erst in Gang gesetzt wird, wenn der Polierer die Zahnoberfläche berührt. Mit langsamen Umdrehungen und wenig Druck den Polierer über die Zahnoberfläche und unter den losen Zahnfleischsaum führen. Die Behandlung mit frischer Paste wiederholen, bis alle Zahnoberflächen sorgfältig gereinigt und poliert sind. Mit Becht-Zahnseide überschüssige Paste in die Approximalräume bringen. Danach gründlich ausspülen.

Eigenschaften

- Reinigung aller Zahnoberflächen bei Verfärbungen oder Verunreinigungen
- Natriumfluorid unterstützt die Remineralisierung und beugt Entzündungen des Zahnfleisches vor
- Amaguard bindet Quecksilberdämpfe bei der Politur von Amalgamfüllungen
- Minz-Geschmack
- Korngröße: RDA 250

Haltbarkeit

5 Jahre

Zusammensetzung

Bimsstein (max. 125 µm), Natriumfluorid (0,2%), Amaguard, Aroma- und Farbstoffe



Lieferform

Art. Nr. 480 Tube mit 95 g

Zubehör

Kelchbürste 4 mm, weiß, montiert für Winkelstück

Art. Nr. 260.21 mit Naturborsten

Art. Nr. 260.2N mit Nylonborsten

Art. Nr. 264.2 mit weichem Ziegenhaar

Art. Nr. 201, 203, 205 Gummipolierer, blau und gelb, für alle Montagen



Klassifizierung

Medizinprodukt, Klasse I, RL 93/42/EWG, Anhang IX, Regel 1

Hersteller

Alfred Becht GmbH, Postfach 1145,
D-77601 Offenburg, Tel.: +49 781 605860,
Fax.: +49 781 6058640,
www.becht-online.de