

Produktdatenblatt ProphyRepair Prophylaxepaste

Anwendungsbereich

Prophylaxepaste zur Reinigung, Politur und Remineralisierung vitaler Zähne.

Anwendung

Nach der Zahnsteinentfernung ProphyRepair in ein Dappenglas oder ein vergleichbar geeignetes Behältnis geben. Eine kleine Menge Paste dann mit dem Gummikelch oder der Polierbürste aufnehmen und in das Arbeitsgebiet einbringen. Darauf achten, dass das Winkelstück erst in Gang gesetzt wird, wenn der Polierer die Zahnoberfläche berührt. Mit langsamen Umdrehungen und wenig Druck den Polierer über die Zahnoberfläche und unter den losen Zahnfleischsaum führen. Die Behandlung mit frischer Paste wiederholen, bis alle Zahnoberflächen sorgfältig gereinigt und poliert sind. Mit Becht-Zahnseide überschüssige Paste in die Approximalräume bringen. Danach gründlich ausspülen.

Eigenschaften

- Schonende Reinigung, effektive Feinpolitur vitaler Zähne
- Härtung des Zahnschmelzes durch das Plus an Hydroxylapatit
- Geringe Schaumbildung
- RDA 34 (Endpolitur)
- Gluten- und phthalatfrei
- Angenehmer Minzgeschmack

Haltbarkeit

4 Jahre

Zusammensetzung

amorphes Siliciumdioxid,
Polyethylenglykole, Parabene,
Hydroxylapatit (0,5%),
Aromastoffe



Lieferform

REF 486 Tube mit 95 g

Zubehör

Kelchbürste 4 mm, weiß, montiert für Winkelstück

REF 260.230 mit Naturborsten

REF 260.230N mit Nylonborsten

REF 260.250N soft mit Nylonbürsten, pink

REF 260.260N soft mit Nylonbürsten, weiß

REF 201, 203, 205 Gummipolierer, blau und gelb, für alle Montagen

Klassifizierung

Medizinprodukt, Klasse I, RL 93/42/EWG, Anhang IX, Regel 5

Hersteller

Alfred Becht GmbH, Carl-Zeiss-Str. 16,
D-77656 Offenburg, Tel.: +49 781 605860,
Fax.: +49 781 6058640,
www.becht-online.de