

Produktdatenblatt Perma Evolution

Anwendungsbereich

Wurzelfüllmaterial auf Epoxidharzbasis für permanente Wurzelfüllungen.

Anwendung

Vor Gebrauch muss die Verschlusskappe von der Doppelkammerspritze durch drehen gegen den Uhrzeigersinn entfernt werden. Eine Mischkanüle wird aufgesetzt, wobei die Feder der Mischkanüle in die Nut der Spritze eingeführt und die Kanüle im Uhrzeigersinn festgedreht wird. Durch das Drücken des Kolbens werden die beiden Pasten in der Mischkanüle im Verhältnis 1:1 zur gebrauchsfertigen Paste vermischt. Die Paste kann mit einem Endo Tip sowie mit Anmischblock und Lentulo / Guttaperchastift appliziert werden. Nach Abschluss der Behandlung muss die Verschlusskappe wieder auf die Spritze aufgedreht und die Mischkanüle verworfen werden.

Eigenschaften

- geeignet für alle Wurzelfüllungstechniken (außer retrograde Methoden)
- frei von Iodoform und Paraformaldehyd
- beste Biokompatibilität
- dimensionsstabil
- optimale Viskosität
- keimtötend
- röntgensichtbar
- hohe Adhäsion am Dentin
- einfaches Retreatment
- integrierter Reparaturmechanismus von Mikrorissen im ausgehärteten Material
- Doppelkammerspritze für einfache und sichere Anwendung
- erfüllt die Anforderungen der ISO 6876:2002 an zahnärztliche Wurzelkanalfüllungswerkstoffe
- Verarbeitungszeit: 15 Minuten
- Vollständige Aushärtung: 24 Stunden



Zusammensetzung

Paste 1:

4-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol-Epichloridinharz, Alkylglycidylether, Bariumsulfat, tri-Calciumphosphat, Diphenylolpropan-di-Glycidylether

Paste 2:

Polyalkoxyalkylamin-Copololymer, 5-Amino-1,3,3-trimethylcyclohexanmethylamin, Aqua, Bariumsulfat, tri-Calciumphosphat, nanodisperses Siliciumdioxid, Polyhexamethylenbiguanid-Hydrochlorid

Haltbarkeit

24 Monate

Lieferform

Art. Nr. 555 Eine Doppelkammerspritze mit 12 g Inhalt, 20 Mischkanülen und 20 Endo Tips



Zubehör

Art. Nr. 555.1 Refill mit 25 Mischkanülen

Art. Nr. 555.2 Refill mit 25 Endo Tips



Klassifizierung

Medizinprodukt, EG-Zertifikat: G1 03 05 49628001, TÜV Product Service München

Hersteller

Alfred Becht GmbH, Postfach 1145,
D-77601 Offenburg, Tel.: +49 781 605860,
Fax.: +49 781 6058640,
www.becht-online.de