

Produktdatenblatt Bechtol Premium Konzentrat

Anwendungsbereich

Wenn chirurgische Instrumente schnell und wirtschaftlich desinfiziert werden sollen.

Anwendung

Zur Herstellung einer 1%igen Gebrauchslösung werden 990 ml Leitungswasser in eine Wanne gegeben und mit 10 ml Bechtol Premium Konzentrat vermischt (entspr. 980 ml Leitungswasser und 20 ml Konzentrat bei 2%igem Ansatz). Gebrauchte Instrumente werden unmittelbar in die Lösung eingelegt. Vollständige Benetzung und Mindesteinwirkzeiten beachten. Lösung täglich erneuern. Anwendungsbeschränkungen der Instrumentenhersteller beachten.

Wirkungsspektrum / Eigenschaften

- wirkt bakterizid und fungizid mit Kurzzeitwerten von 2% in 15 Minuten und 1% in 30 Minuten
- wirkt gegenüber M. terrae mit Kurzzeitwerten von 3% in 30 Minuten und 1% in 60 Minuten
- Vollständige Virusinaktivierung (HBV/HCV/HIV/Vaccinia/BVDV/Adeno/Polio) mit Kurzzeitwerte von 3% in 15 Minuten
- auch unter hoher organischer Belastung
- ohne Chloride und daher korrosions-sicher
- ausgezeichnete Materialverträglichkeit
- *mit Kurzzeitwert von 3% in 5 Minuten im Ultraschallbad
- phenol- und aldehydfrei
- biologisch abbaubar
- pH-Wert: 11,3

Zusammensetzung

100g Bechtol Premium Konzentrat enthalten:
8,0 g Benzalkoniumchlorid
4,0 g Dodecyldipropylen-triamin

Haltbarkeit

30 Monate



Lieferform

REF 536 Dosierflasche mit 1 Liter Konzentrat

REF 536.5 Kanister mit 5 Liter Konzentrat

Zubehör

REF 567.5 Dosierpumpe für 5 Liter Kanister

REF 565 Desinfektionswanne, ca. 4 Liter, mit Siebeinsatz und Deckel



Listung

*Gelistet bei der DGHM/VAH.

Gutachten

Gutachten gemäß DGHM (Stand: 01.09.2001):

- Dipl. Biol. Dr. H. H. Brill /Hamburg /2012 Mycobacterium terrae:

- Dipl. Biol. Dr. H. H. Brill /Hamburg /2011 BVDV

Vaccinia

Adeno/Polio - Virus-Wirkung:

- Prof. Dr. med H.-P. Werner/Schwerin/2011

Klassifizierung

Medizinprodukt Klasse IIb, Regel 15,
EG-Zertifikat: G1 08 05 49628 004, TÜV
Product Service München

Hersteller

Alfred Becht GmbH, Carl-Zeiss-Str. 16,
D-77656 Offenburg, Tel.: +49 781 605860,
Fax.: +49 781 6058640,
www.becht-online.de