

Produktdatenblatt Bechtozid Plus

Fertiglösung

Anwendungsbereich

Pumpspray für die schnelle Flächen-desinfektion und optimale Hygiene im Patiententakt

Anwendung

Zwischen dem Patientenwechsel zur besonderes schnellen Desinfektion aller Oberflächen wie Behandlungsstühle, Möbel, Schwebetische, Unit- und Türgriffe etc. Materialschonend (Röhm-Test: 12/2006) Bechtozid Plus auf ein sauberes Tuch sprühen und damit die kontaminierte Oberfläche abwischen.

Wirkungsspektrum / Eigenschaften

- umfassende und sichere mikrobizide Wirkung
- bereits in wässriger Lösung bakterizid und fungizide Wirkung in 1 Minute
- inaktiviert HBV/HCV/HIV/BVDV/Vaccinia - Viren in 1 Minute
- materialschonend (Röhm-Test: 12/2006)
- phenol- und aldehydfrei
- biologisch abbaubar
- pH-Wert: 7,5

Zusammensetzung

100 g Bechtozid Plus enthalten:
250 mg Benzyl-C12-C18-alkyldimethyl-Chlorid
250 mg Didecyldimethylammoniumchlorid
250 mg C12-C14[(ethylphenyl)methyl]dimethyl-Chlorid
20 g Ethanol
10 g 1-Propanol

Haltbarkeit

30 Monate

Lieferform

Art. Nr. 544.N Flasche mit 1 Liter gebrauchsfertiger Lösung, duftneutral, wiederbefüllbar

Art. Nr. 544 Flasche mit 1 Liter gebrauchsfertiger Lösung, mit Citro Duft, wiederbefüllbar



Art. Nr. 544.5 Kanister mit 5 Liter gebrauchsfertiger Lösung, mit Citro Duft

Art. Nr. 544.10N Kanister mit 10 Liter gebrauchsfertiger Lösung, duftneutral

Art. Nr. 544.10 Kanister mit 10 Liter gebrauchsfertiger Lösung, mit Citro Duft

Art. Nr. 544.SP Sprühkopf für 1 Liter Flasche

Zubehör

Art. Nr. 567.5 Dosierpumpe für 5 und 10 Liter Kanister

Art. Nr. 567.51 Ausgießer für 5 und 10 Liter Kanister



Listung

Gelistet bei der DGHM/VAH

Gutachten

Gutachten gemäß DGHM (Stand: 01.09.2001):

- Prof. Dr. med. R. Schubert / Frankfurt am Main / 2006

Gutachten gemäß DGHM (Stand: 12.07.1991):

- Prof. Dr. med Dr. pil. Eugen Marth / Graz / 1998

Hepatitis B Wirkung:

- Prof. Dr. med Gert Frösner / München / 1996

BVDV-/Vaccziniavirus:

- Prof. Dr. Jochen Steinmann / Bremen / 2005

Klassifizierung

Medizinprodukt, EG-Zertifikat: G1 03 05 49628001, TÜV Product Service München

Hersteller

Alfred Becht GmbH, Postfach 1145,
D-77601 Offenburg, Tel.: +49 781 605860,
Fax.: +49 781 6058640,
www.becht-online.de