

Plus Unisepta®



Schnelle Desinfektion der Oberflächen
von Medizinprodukten.

Qualitativ hochwertige, gebrauchsfertige, alkoholbasierte Lösung zur schnellen Desinfektion der Oberflächen von Medizinprodukten. Mit einer schnellen Einwirkzeit von nur 30 Sekunden ist Unisepta® Plus besonders beim schnellen Patientenwechsel geeignet.

Hauptmerkmale

- Ethanol-basiert
- Kontaktzeit 30 Sekunden
- Ausgezeichnetes Wirkspektrum
- Hinterlässt keine Rückstände oder Schlieren
- Frischer Zitrusduft
- CE-Kennzeichnung gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG
- VAH/DGHM-zertifiziert



USF Healthcare S.A. | Rue François Perréard 4 | CH-1225 Chêne Bourg | Genf | Schweiz
Fon + 41 22 839 79 00 | Fax + 41 22 839 79 10 | info@usfhc.com
www.usfhealthcare.com

UNIDENT
SWISS

Plus Unisepta®

Anwendungsprotokoll

Vor Gebrauch


Stellen Sie sicher, dass Handschuhe getragen werden.



Stellen Sie sicher, dass der zu behandelnde Bereich zuvor gereinigt wurde und alkoholbeständig ist.



Direkt auf den zu behandelnden Bereich oder auf ein Vliestuch aufsprühen und dann wischen. Vergewissern Sie sich, dass die Lösung auf den gesamten zu behandelnden Bereich aufgetragen wurde.

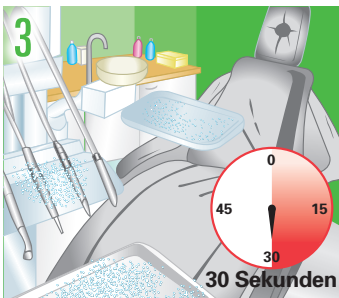

Lassen Sie die Lösung mindestens 30 Sekunden lang einwirken. **Spülen Sie sie nicht ab!**


Vorsichtsmaßnahmen

Gefährlich – Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch beachten (erstellt gemäß Richtlinie 99/45/EG und ihrer Anpassungen).

Lagerung bei +5°C bis +25°C.

Medizinprodukt der Klasse IIa, CE0459 (geänderte Richtlinie 93/42/EWG).

Wirkspektrum

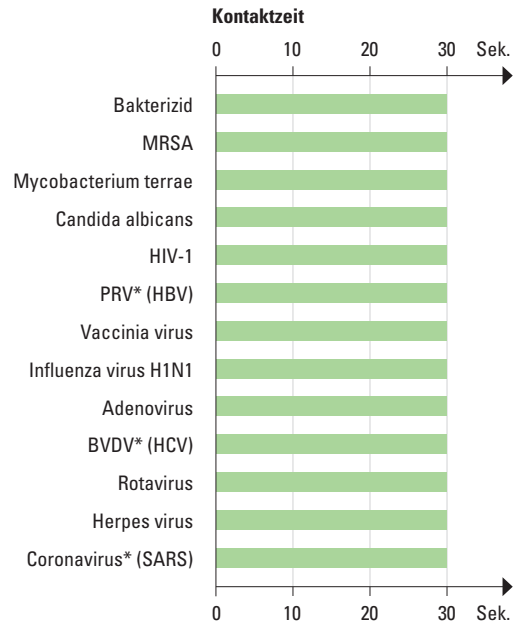

* PRV: Surrogat für Hepatitis B

* BVDV: Surrogat für Hepatitis C

* Coronavirus: Surrogat für SARS

Stimmt mit folgenden europäischen Standards überein

Bakterizid: EN 1040, EN 1276, EN 13727, EN 14561

Tuberkulozid: EN 14348, EN 14563

Levurozid: EN 1275, EN 13624, EN 14562

Zusammensetzung

100 g Unisepta® Plus enthält Ethanol (55 g),

Didecylmethyloxyethylammoniumpropionat (0,11 g),

Duftstoff.

Physikalische Angaben

Farbe: Farblos

Duft: Frischer Zitrusduft

Haltbarkeit: 3 Jahre

Behälter: HDPE, recycelbar

Packungsgrößen

750 ml Spray	1L	2,5L	5L
✓			✓



ECOEngage
Our Ecological Engagement



USF Healthcare
Unident • Steridine • Farmec

UNIDENT
SWISS