

# FLÄCHEN

## GREEN&CLEAN SD

 METASYS

**Alkoholische Sprühdesinfektion zur Desinfektion von Oberflächen von Medizinprodukten (z.B. alkoholunempfindliche Oberflächen der dentalen Einheit, wie Schwebetische, Ablagen)**



### Wichtige Produktmerkmale:

- kurze Einwirkzeit
- gebrauchsfertige Desinfektionslösung
- Remanenzeffekt verhindert sofortige Wiederansiedlung von Anflugkeimen
- formaldehydfrei
- tropffreier Sprühkopf
- DGHM/VAH und ÖGHMP gelistet
- CE 0408

Wirkungsspektrum	Lösungsverhältnis	Einwirkzeit
begrenzt viruzid (z.B. HBV/HIV/HCV, HSV-1)	nicht zutreffend	30 Sekunden
bacterizid, fungizid (C. albicans)	nicht zutreffend	1 Minute
tuberkulozid	nicht zutreffend	5 Minuten

### Gutachten

Prof. Dr. med. L. Döhner, Greifswald  
Prof. Dr. med. H.-P. Werner, Schwerin  
Dr. med. J. Steinmann, Bremen  
Prof. Dr. med. G. Frösner, München

### Moderne Wirkstoffkombination

Alkohole, quartäre Ammoniumverbindungen, Glyoxal

### Bestellnummern

Bezeichnung	Bestellnummern
Einführset, 5 x 750 ml + Sprühflasche	60030001
Nachfüllset 1, 6 x 750 ml Beutel	60030002
Nachfüllset 2, 1 x Kanister 5 l	60030003
Nachfüllset 3, 2 x 750 ml + Sprühflasche	60300001
Auslaufhahn 5 l Kanister	40200004

## Gefahren- und Sicherheitshinweise:

<b>H226</b>	Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
<b>H319</b>	Verursacht schwere Augenreizung
<b>P101</b>	Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
<b>P102</b>	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

## Produktidentifikatoren:

<b>CAS 64-17-5</b>	Ethanol
<b>CAS 67-63-0</b>	Propan-2-ol
<b>CAS 107-22-2</b>	Glyoxal
<b>CAS 7173-51-5</b>	Didecyldimethylammoniumchlorid
<b>Signalwort</b>	Achtung

## Physikalische und chemische Eigenschaften

<b>Aggregatzustand</b>	flüssig
<b>Farbe</b>	farblos
<b>Geruch</b>	Alkohol
<b>pH-Wert</b>	neutral
<b>Dichte</b>	0,89 g/cm <sup>3</sup>
<b>Löslichkeit</b>	vollständig mischbar
<b>Siedepunkt</b>	78 °C
<b>Flammpunkt</b>	23 °C
<b>Gefrierpunkt</b>	< 0°C



**METASYS Medizintechnik GmbH**  
Florianstraße 3, 6063 Rum bei Innsbruck, Austria  
Phone: +43 512 205420 - Fax: +43 512 205420 7  
[www.metasys.com](http://www.metasys.com) - [info@metasys.com](mailto:info@metasys.com)

**GERMANY**  
METASYS Medizintechnik GmbH  
Ahornstraße 19  
85614 Kirchseeon  
Phone: +49 2236 37 42 42

**FRANCE**  
METASYS France S.a.r.l.  
9, bd E. Michelet  
69008 Lyon  
Phone: +33 4 37 90 22 15

**ITALY**  
DENTAL ECO SERVICE ITALIA S.R.L.  
Florianstraße 3  
6063 Rum bei Innsbruck  
Phone: +39 045 981 4477

