




## Pflegeanweisung für MK-dent Rotoren




**Wichtig:** Bitte führen Sie die folgenden Schritte **vor jedem Autoklavieren** in der angegebenen Reihenfolge durch! Ansonsten verkürzen Sie die Lebensdauer Ihrer Instrumente und Rotoren erheblich!

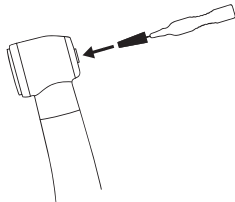

### 1. Reinigen der Spannzange mit der beigefügten Dentalbürste

Führen Sie das beiliegende Dentalbürstchen in die Spannzange ein, lösen und entfernen Sie mit drehenden Bewegungen vorsichtig eventuelle Ablagerungen und Verschmutzungen.


Wiederholen Sie diesen Vorgang mehrere Male.

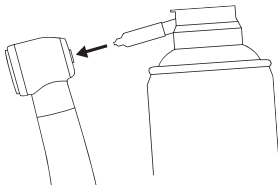

### 2. Ölen der Spannzange

Setzen Sie den beiliegenden Öladapter LT1014 auf die Öldose (wir empfehlen das vollsynthetische MK-dent Premium Service-Öl LU1011) und sprühen Sie für ca. 2 Sekunden. **Zählen Sie 1..... 2.....**

Bei starken Verschmutzungen können die Schritte 1 und 2 mehrmals wiederholt werden.

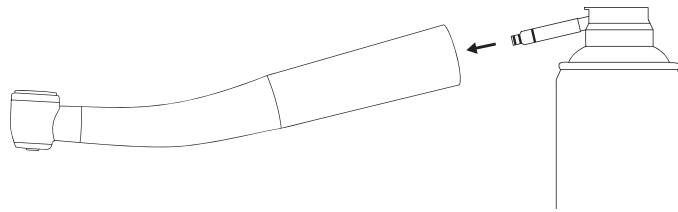

### 3. Ölen des Kanals für Antriebsluft

a) Setzen Sie den für Ihr Handstück passenden Öladapter auf die Öldose und sprühen Sie für ca. 2 Sekunden in den Kanal für Antriebsluft. **Zählen Sie 1..... 2.....**

b) Schließen Sie das Handstück an die Kontrolleinheit oder die Reinigungsstation im Sterilisationsraum an und lassen Sie es 10 bis 15 Sekunden laufen, damit überflüssiges Öl entweichen kann.



Alle weiteren Schritte zur Pflege und Sterilisation von Handstücken entnehmen Sie bitte dem MK-dent Ölflyer bzw. der Gebrauchsanweisung Ihres Handstückes.