

WELLSAWIPES NACHFÜLLBARER SPENDEREIMER

Für den Einsatz von
WELLSAWIPES GETRÄNKTE
DESINFEKTIONSTÜCHER



Anwendung

Spendereimer für gebrauchsfertige, alkoholische Desinfektionstücher zur Wischdesinfektion. Flächen und Gegenstände mit einem gebrauchsfertigen Desinfektionstuch desinfizieren. Dabei auf vollständige Benetzung und Einwirkzeit achten. Anwendung für nichtinvasive Medizinprodukte. Unzugängliche Stellen vorher mit WELLSACLEAN S+ SCHNELLDESINFEKTION benetzen, einwirken lassen und anschließend mit einem ungefärbten Einmaltuch abwischen. Entnehmen Sie das Wirkspektrum und die entsprechenden Einwirkzeiten dem Produktdatenblatt der Desinfektionstücher.



Längeren Kontakt von über 48 Stunden mit Linoleumböden und Polycarbonat (Makrolon) vermeiden. Kontakt mit Acrylaten vermeiden. Bei Acrylgas Gefahr von Spannungsrissskorrosion. Bei Polyacrylaten und Polycarbonaten (Makrolon) sowie nicht in der Produktinformation aufgeführten Materialien vor Gebrauch eine Materialprüfung durchführen.

Erst-/Neubefüllung des Spendereimers mit WELLSAWIPES GETRÄNKTE DESINFEKTIONSTÜCHER

Tragen Sie aus Gründen des Personalschutzes und zum Schutz vor Kontamination Kittel, Mundschutz, Augenschutz und Handschuhe. Für ausreichende Belüftung sorgen.

Vor jeder Erst-/Neubefüllung sind der Vliestuchspenderimer und der Deckel gründlich maschinell oder manuell zu reinigen und anschließend z. B. mit WELLSAWIPES GETRÄNKTE DESINFEKTIONSTÜCHER und/oder WELLSACLEAN S+ SCHNELLDESINFEKTION zu desinfizieren.

Befüllung des Eimers:

- Zusatzetikett ausfüllen (siehe Produktangaben auf dem Nachfüllbeutel) und auf den Eimer kleben.
- Setzen Sie den Nachfüllbeutel in den aufbereiteten Eimer ein.
- Schneiden Sie den Nachfüllbeutel oben auf und führen das Vliestuch durch die Deckelöffnung. Produkt ist jetzt einsatzbereit.
- Eimer schließen. Achten Sie darauf, dass der Eimer vollständig verschlossen ist.

Vor Gebrauch stets die Kennzeichnung, Sicherheitsdatenblatt und Produktinformation lesen.

Lagerhinweis:

Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Behälter dicht geschlossen halten. Produkt stehend lagern.



Vliestücher nur zum Einmalgebrauch. Vliestücher nach Verwendung nicht über Toilette entsorgen.



Standzeit der gebrauchsfertigen Desinfektionstücher ab **Öffnungsdatum**: 28 Tage
Die mikrobiologische Stabilität über 28 Tage gilt, wenn nach jeder Tuchentnahme der Eimer sauber und dicht verschlossen wird. Nach Ablauf der 28 Tage Standzeit oder bei Neubefüllung die Reste aus dem Spendereimer entleeren. Der Spendereimer kann nach Aufbereitung wiederverwendet werden.



Die **Produktzusammensetzung** entnehmen Sie dem **Etikett des Beutels im Spendereimer**.

Die **Gefahrenkennzeichnung** für den Spendereimer entnehmen Sie dem **Etikett des Beutels im Spendereimer**.

Sicherheitsdatenblatt und Produktinformation auf www.wellsamed.com
Stand: 21.01.2021



Referenzen

- REF WCW103 = 3 Liter Eimer für 70 Blatt Vliestuchrolle (REF WCW407)
- REF WCW105 = 5 Liter Eimer für 90 Blatt Vliestuchrolle (REF WCW409)



PLIWA Hygiene GmbH
Pliwastraße 2
34323 Malsfeld-Ostheim



 wellsamed GmbH
Brahestr. 16
04347 Leipzig
www.wellsamed.com

