

Reinigen Sie *zwischen* den Zähnen



Eine Interdentalbürste reinigt auch da, wo die Zahnbürste alleine nicht ausreicht. Durch die tägliche Zahnzwischenraumpflege können Sie Karies und Zahnfleischerkrankungen vorbeugen.

TePe bietet eine Vielzahl an Interdentalbürsten – für alle Zahnzwischenräume. Die Bürsten sind in verschiedenen Größen, Borsten und Griffhöhen erhältlich. Alle Größen sind farbcodiert und mit Kunststoff ummantelt. Ihr/e Zahnarzt/Zahnärztin oder Zahnarzt-helfer/in hilft Ihnen gerne bei der Auswahl der Interdentalbürsten und gibt Ihnen Tipps zum richtigen Umgang.



Drei einfache Schritte zu sauberen *Zahnzwischenräumen*

1. Führen Sie die Interdentalbürste vorsichtig zwischen die Zähne. Schauen Sie dabei in den Spiegel, um die Anwendung zu vereinfachen. Versuchen Sie niemals, die kleinen Bürstchen mit Gewalt in den Zahnzwischenraum zu führen.
2. Bewegen Sie die Interdentalbürste mehrmals rein und wieder raus.
3. Spülen Sie die Bürste nach Gebrauch gründlich ab und wechseln Sie die Bürste, wenn die Borsten abgenutzt sind.



Für Sie in Ihrer Apotheke:

Interdentalbürsten (IDB) Original

| | PZN: | PHZ: |
|----------------|-----------------------------------|---------|
| Pink 0,4 mm | 07641185 <input type="checkbox"/> | 3698509 |
| Orange 0,45 mm | 07641191 <input type="checkbox"/> | 3698490 |
| Rot 0,5 mm | 07641305 <input type="checkbox"/> | 3698449 |
| Blau 0,6 mm | 07641311 <input type="checkbox"/> | 3698225 |
| Gelb 0,7 mm | 07641328 <input type="checkbox"/> | 3698366 |
| Grün 0,8 mm | 07641386 <input type="checkbox"/> | 3698461 |
| Lila 1,1 mm | 07641392 <input type="checkbox"/> | 3698484 |
| Grau 1,3 mm | 07641423 <input type="checkbox"/> | 3698455 |
| Schwarz 1,5 mm | 07641446 <input type="checkbox"/> | 3698478 |
| Gemischt | 07784594 <input type="checkbox"/> | 3814789 |

Interdentalbürsten (IDB) X-soft

| | | |
|--------------------|-----------------------------------|---------|
| Hellorange 0,45 mm | 09724768 <input type="checkbox"/> | 3995756 |
| Hellrot 0,5 mm | 09724805 <input type="checkbox"/> | 3995762 |
| Hellblau 0,6 mm | 09724834 <input type="checkbox"/> | 3995779 |
| Hellgelb 0,7 mm | 09724840 <input type="checkbox"/> | 3995785 |
| Hellgrün 0,8 mm | 09724863 <input type="checkbox"/> | 3995791 |
| Helllila 1,1 mm | 09724892 <input type="checkbox"/> | 3995816 |
| Gemischt | 09724923 <input type="checkbox"/> | 3995839 |

Deutschland = PZN / Österreich = PHZ

TePe Angle™

| | PZN: | PHZ: |
|----------------|-----------------------------------|---------|
| Pink 0,4 mm | 07708682 <input type="checkbox"/> | 3793260 |
| Orange 0,45 mm | 07708713 <input type="checkbox"/> | 3793277 |
| Rot 0,5 mm | 07708848 <input type="checkbox"/> | 3793283 |
| Blau 0,6 mm | 07708860 <input type="checkbox"/> | 3793308 |
| Gelb 0,7 mm | 07708877 <input type="checkbox"/> | 3793314 |
| Grün 0,8 mm | 07709032 <input type="checkbox"/> | 3793320 |
| Gemischt | 07709049 <input type="checkbox"/> | 3793337 |

Gel für Interdentalbürsten

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|---------|
| Interdental Gel 20 ml | 05133467 <input type="checkbox"/> | 3335149 |
| Gingival Gel 20 ml | 09432095 <input type="checkbox"/> | 3894512 |

Zahnseide

| | | |
|------------------------------|-----------------------------------|---------|
| Dental Floss >gewachst< 30 m | 07784482 <input type="checkbox"/> | 3817351 |
| Dental Floss >gewachst< 5 m | 07784499 <input type="checkbox"/> | 3817368 |
| Mini Flosser 36 St. | 09440568 <input type="checkbox"/> | 3895368 |

TePe PlaqSearch™

| | | |
|--------------|-----------------------------------|---------|
| 10 Tabletten | 04807544 <input type="checkbox"/> | 4098013 |
|--------------|-----------------------------------|---------|

Praxisstempel:

TePe Mundhygieneprodukte Vertriebs-GmbH
Flughafenstraße 52, D-22335 Hamburg
Tel +49 (0)40 570 123-0 • Fax +49 (0)40 570 123-190
kontakt@tepe.com • www.tepe.com

Patienten-Ratgeber



Interdentale Reinigung





Der Zahn hat 5 Seiten – putzen Sie alle?

Mit der Zahnbürste putzt man die Kauflächen, die Außen- und die Innenseiten. Der Zahn hat jedoch zwei weitere Seiten zwischen den Zähnen – die schnell vergessen werden.

Wussten Sie, dass die meisten Zahnkrankheiten zwischen den Zähnen entstehen? Mit einer regelmäßigen interdentalen Reinigung kann man die Entstehung von Plaque und Zahnstein und dessen Folgekrankheiten vermeiden.



❗ Wussten Sie, dass die Zahnbürste alleine nur 60 % der Zahnflächen reinigt?

Drei Schritte für ein gesundes Lächeln und frischen Atem:

1. Zähne mit Zahnbürste und fluoridhaltiger Zahnpasta zweimal täglich putzen.
2. Zahnzwischenräume mit einer Interdentalbürste, Zahnseide oder Zahnholzern täglich reinigen – das Interdental Gel sorgt für einen extra Kariesschutz.
3. Tägliche Verwendung eines Zungenreinigers.


*Quelle: Nielsen; Interdentalprodukte €/Stk. MAT 8/2012 in D




Interdentalbürsten – Original

Interdentalbürsten Original sind in neun Größen erhältlich, passend für alle Interdentalräume. Jede Größe hat ihre eigene Farbe, um die Suche nach dem richtigen Maß zu erleichtern. Alle Größen haben einen kunststoffummantelten Draht, um eine schonende Reinigung zu garantieren. Für eine einfache Anwendung ist der Griff kurz und handlich und die hohe Qualität der Borsten sorgt für eine effiziente Reinigung.

Auch in **X-soft** erhältlich.

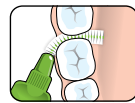

Für eine bessere Zugänglichkeit in den Molaren kann die Interdentalbürste leicht gebogen werden (nicht knicken). Nutzen Sie für die Vorderzähne eine separate, nicht gebogene Interdentalbürste.

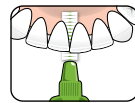


Die luftdurchlässige Schutzkappe kann als hygienischer Schutz und auch zur Griffverlängerung verwendet werden.




TePe Angle™ – noch bessere Zugänglichkeit

Diese Bürste ist gewinkelt, um einen perfekten Zugang zu allen Interdentalräumen zu gewährleisten. Der schmale, gewinkelte Bürstenkopf erleichtert die Reinigung zwischen den Backen- und den Vorderzähnen sowie von der Innenseite. Der lange, flache Griff gewährleistet eine einfache Handhabung. TePe Angle ist in sechs Größen erhältlich, alle mit kunststoffummanteltem Draht.

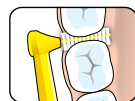

Reinigung der Molaren, bukkal

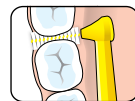

Reinigung der Molaren, lingual

Gel für unsere Interdentalbürsten

Das Interdental Gel bietet einen extra Kariesschutz in den Interdentalräumen.

Das Gingival Gel besteht aus einer kraftvollen Kombination aus Chlorhexidinen und Fluoriden zum Schutz von Zahnfleisch und Zähnen.



Zahnseide

Die Zahnseide entspricht höchster Qualität. Für eine effizientere Reinigung ist die Zahnseide gewachst.

Einzigartige Beißerfläche



Verbesserter Griff

TePe Mini Flosser™ Der kleine Zahnseidenhalter von TePe ermöglicht, insbesondere Personen, die mit normaler Zahnseide nicht zurechtkommen, ein einfaches und schonendes Fädeln.

Zahnholz

Die Zahnholzer sind dreieckig geformt und somit der natürlichen Form des Approximalraums angepasst. Erhältlich in drei Größen, jeweils mit oder ohne Fluorid.



Für sehr enge Interdentalräume eignet sich der extra dünne Plastikzahnstocher. Die leicht angeraute Oberfläche optimiert den Reinigungseffekt.

TePe PlaqSearch™

Mit einer Plaque-Färbetabelle können Sie einfach und schnell prüfen, ob alle Bereiche gründlich gereinigt sind. TePe PlaqSearch zeigt durch eine rote Färbung neuere Plaque, durch blau ältere Plaque.

