



Fachinformation

durimplant

Hersteller

lege artis Pharma GmbH + Co. KG
Postfach 60, D-72132 Dettenhausen
Breitwasenring 1, D-72135 Dettenhausen
Telefon +49 (0) 71 57 / 56 45 - 0
Fax +49 (0) 71 57 / 56 45 50
E-Mail: info@legeartis.de

Bezeichnung

durimplant

Implantat-Pflege-Gel

Lang anhaltender Schutz des Zahnimplantats durch wirksame Zahnfleischpflege

Bestandteile

PARAFFINUM LIQUIDUM, HYDROXYPROPYL METHYLCELLULOSE, POLYETHYLENE, SILICA (Nano), ALLANTOIN, SALVIA LAVANDULIFOLIA, MENTHA PIPERITA, THYMOL, AQUA, CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE, CHLORHEXIDINE DIACETATE, ASPARTAME, LINALOOL, LIMONENE

Enthält eine Phenylalaninquelle.

Anwendungsgebiete und Eigenschaften

durimplant dient zur Pflege von Zahnfleisch und Mundschleimhaut sowie zur Vorbeugung von Entzündungen in der Umgebung von Zahnimplantaten (z.B. Periimplantitis).

Das viskose, standfeste Gel haftet sehr gut auf Zahnfleisch und Mundschleimhaut.

Nach dem Auftragen auf das Gewebe - beispielsweise um neue Zahnimplantate – bildet es eine dünne, weiche Schutzschicht, die Salbei und Allantoin enthält.

durimplant ist wasserabweisend und verbleibt somit leicht auf dem Gewebe.

Zahnfleisch und Mundschleimhaut werden gepflegt. Einer Entzündung wird vorgebeugt.

durimplant kann auch bei allen leichten Entzündungen, Irritationen und Druckstellen im Mund- und Rachenraum zur milden Pflege der Mundschleimhaut und des Zahnfleisches und damit zur Unterstützung der natürlichen Wundheilung und Geweberegeneration eingesetzt werden.

Als lang anhaftender Film dient es zusätzlich dem Schutz vor chemischen und mechanischen Reizen.

Art der Anwendung

In der Zahnarztpraxis:

Das viskose Gel in der benötigten Menge rund um das Implantat auf das leicht feuchte Zahnfleisch oder auf die zu behandelnde Stelle mit einem geeigneten Instrument (z.B.

Einbüschel-Bürsten von TePe: Compact Tuft, PZN 2745224 oder Interspace x-weich, PZN 8864007) in dünner Schicht auftragen. Das Gel kann bei Bedarf auch etwas intensiver in das Zahnfleisch / die Mundschleimhaut einmassiert werden.

Zu Hause und unterwegs:

Das Gel auf die saubere Fingerkuppe, ein Wattestäbchen oder ein anderes geeignetes Instrument (z.B. Einbüschel-Bürsten von TePe: Compact Tuft, PZN 2745224 oder Interspace x-

weich, PZN 8864007) in etwa linsen- bis erbsengroßer Menge aufbringen und danach auf das feuchte Zahnfleisch um das Implantat herum oder auf die zu behandelnde Stelle auftragen.

Anschließend kann die Oberfläche noch leicht mit dem speichelfeuchten Finger geglättet und angepasst oder das Gel in das Zahnfleisch / die Mundschleimhaut einmassiert werden.

Zur Zahnfleischpflege einmal wöchentlich bis einmal täglich nach dem letzten Zähneputzen auftragen.

Bei Bedarf kann *durimplant* in Absprache mit der behandelnden Zahnarztpraxis auch mehrmals täglich angewandt werden.

Haltbarkeit

Das Produkt sollte nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums nicht mehr angewendet werden.

Darreichungsform und Packungsgröße

10 ml Gel in der Tube

PZN: 4999590

Stand der Information

September 2012

Weitere Informationen über www.durimplant.com

0026207/Stückzahl0912/Bestelldatum