



Fachinformation

## **LEGASED natur**

### **Hersteller**

CE

**lege artis** Pharma GmbH + Co. KG  
Postfach 60, D-72132 Dettenhausen  
Breitwasenring 1, D-72135 Dettenhausen  
Telefon +49 (0) 71 57 / 56 45 - 0  
Fax +49 (0) 71 57 / 56 45 50  
E-Mail: [info@legeartis.de](mailto:info@legeartis.de)  
[www.legeartis.de](http://www.legeartis.de)

### **Bezeichnung**

LEGASED natur  
Mund-Wund-Pflaster

### **Zusammensetzung**

Naturharze (Myrrhe, Benzoe, Kolophonium), Ethanol, modifizierte Cellulose und Macrogol

### **Anwendungsgebiete**

Viskose, filmbildende Flüssigkeit zum Auftragen als Schutzfilm bei leichten Entzündungen in der Mundhöhle, Druckstellen und Aphthen. Schützt vor mechanischem Druck und chemischen Reizen und lindert dadurch bestehenden Schmerz.

### **Gegenanzeigen**

Bekannte Überempfindlichkeit gegenüber Naturharzen, insbesondere Kolophonium oder einen der anderen Inhaltsstoffe.  
Nicht in große offene Wunden (z. B. Alveolen) geben.

### **Nebenwirkungen**

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine Nebenwirkungen bekannt.

### **Warnhinweise**

Enthält ca. 23 % Alkohol.

Bei versehentlichem Einbringen in die Augen, mit viel Wasser ausspülen und bei Bedarf einen Arzt aufsuchen.

Verschüttete oder verspritzte Lösung möglichst rasch mit Alkohol oder einem anderen geeigneten Lösemittel (Achtung: kein Wasser oder Reinigungsmittel auf Wasserbasis verwenden, das führt zur sofortigen Ausfällung) entfernen, da die enthaltenen Naturharze sonst verkleben und Flecken hinterlassen können.

## Art der Anwendung

### In der Zahnarztpraxis:

Die zu behandelnde Stelle trocken tupfen und zur besseren Haftung möglichst trocken halten. Anschließend die Lösung mit einem geeigneten Instrument (z. B. Apply-Tip) auf die trockene Schleimhaut aufbringen (nicht einmassieren).

Bei Bedarf lässt sich die Lösung auch aus der Flasche in eine Einwegspritze aufziehen und mit einer stumpfen und nicht zu engen Kanüle gezielt auftragen.

### Zu Hause und unterwegs:

Die zu behandelnde Stelle zur besseren Haftung des Schutzfilms möglichst vorher trocken tupfen (z. B. mit einem Papiertaschentuch). Anschließend die Lösung rasch mit einem Wattestäbchen oder gegebenenfalls der sauberen Fingerkuppe großzügig auftragen (nicht einmassieren). Zur schnelleren Filmbildung kann der Mund kurz mit Wasser ausgespült werden. Die Auftragung kann mehrmals täglich, besonders nach den Mahlzeiten und vor dem Schlafen gehen erfolgen.

## Weitere Hinweise

Die antibakterielle Barrierewirkung des Myrrharzes unterstützt die Wundheilung und Geweberegeneration in positiver Weise und trägt damit zur Schmerzlinderung bei.

## Haltbarkeit

LEGASED natur soll nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr angewendet werden. Die Aufbrauchsfrist nach dem Öffnen des Behältnisses beträgt 6 Monate.

## Lager und Aufbewahrungshinweise

LEGASED natur ist stets gut verschlossen aufzubewahren.

## Darreichungsform und Packungsgrößen

5 ml Lösung  
20 ml Lösung (Praxispackung)

## Stand der Information

Januar 2010

**Wir wünschen Ihnen gute Besserung bei der Behandlung Ihrer Beschwerden!**

Symbol für "Verwendbar bis"



Symbol für "Chargenbezeichnung"



Symbol für "Gebrauchsanweisung beachten"



0026329/Stückzahl0110/Bestelldatum